



특징 및 장점

- 신속성 : 테스트스트립을 용액에 담그면 몇 초 내로 결과 확인이 가능합니다.
- 용이성 : 테스트스트립은 전문가 및 비전문가 모두 사용하기 용이하도록 제작되었습니다.
- 신뢰성 : 비교컬러스케일은 인증된 표준절차를 거쳐 작성되었으며, 모든 측정에 있어 정확도를 보장합니다.

HEMOCHECK Peracetic acid 2000 (REF NO 913 42.206796)

- 과초산 (Peracetic acid, PAA) 측정검사전문용
- 30초 이내 결과 제공
- 10~30도의 상온에 보관
- 측정범위: Peracetic Acid 0-500-1000-1500-2000 mg/l
- 컬러스케일: 밝은 황색 > 적색
- 유효기간 : 30개월

HEMOCHECK Peroxide 25 (REF NO 913 19.206796)

- 과산화물 (peroxide)의 화학적 잔량을 측정 (0.5mg/l 까지 측정가능)
- 15초 이내 결과 제공
- 10~30도의 상온에 보관
- 측정범위 : H2O2 0-0.5-2.5-5-10-25mg/l
- 컬러스케일 : 백색 > 청색
- 유효기간 : 30개월

보관 및 취급상 주의 사항

테스트스트립은 직사광선 및 습한 곳을 피해야 하며, 용기는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. (2~30° C)
 올바르게 보관할 경우, 용기에 인쇄 된 유효기간까지 사용 할 수 있습니다.

포장

테스트스트립 100매/통 (용기재질: 알루미늄)
 테스트스트립 100통/박스

사용방법



2초 동안 테스트스트립을 시료 용액에 담그십시오.



테스트스트립을 흔들어 물기를 제거 하십시오.



15~30초 정도 기다리십시오.



그 다음, 테스트 기준표와 컬러 스케일을 비교합니다.

테스트 기준표와 가장 비슷한 컬러로 측정값을 가져오시면 됩니다. 측정 당시의 컬러 스케일과 시간이 지난 후의 측정값이 다를 수 있으므로, 표기된 시간 내에 스케일을 측정해야만 정확한 값을 얻을 수 있습니다. 따라서 측정 이후의 색깔 변화는 무시해 주시길 바랍니다.

유효기간

30개월

MACHERY-NAGEL
 Duren, Germany **CE**